

NEST[®]

techstar[®]

新型冠状病毒(2019-nCoV) 抗原检测试剂盒(乳胶法)

医疗器械注册证(体外诊断试剂)编号:国械注准20223401224



操作简便



快速检测



结果可视



10-15
分钟出结果



产品编码	规格	包装规格	包装尺寸/mm	重量/kg
SC6h6501	50人份	50份/盒, 24盒/箱	540*440*540	15.50

适用人群


适用人群参照《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》等国家相关规定执行。

1. 基层医疗卫生机构就诊,伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员
2. 隔离观察人员,包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员
3. 有抗原自我检测需求的社区居民


—新冠病毒抗原检测应用方案(试行)

检测流程和结果判读


样本采集图

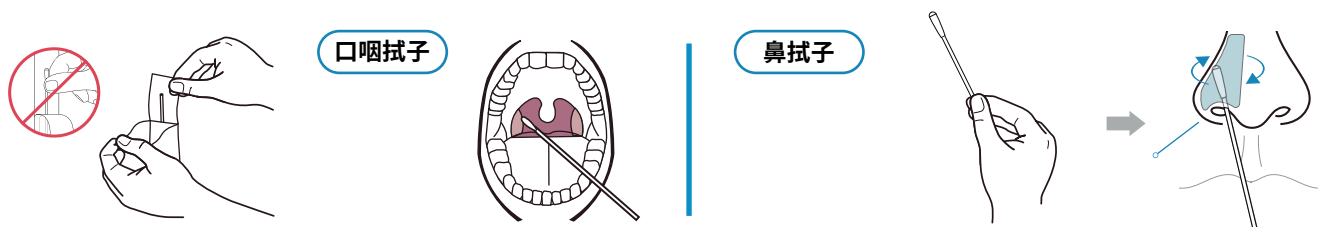

检测方法

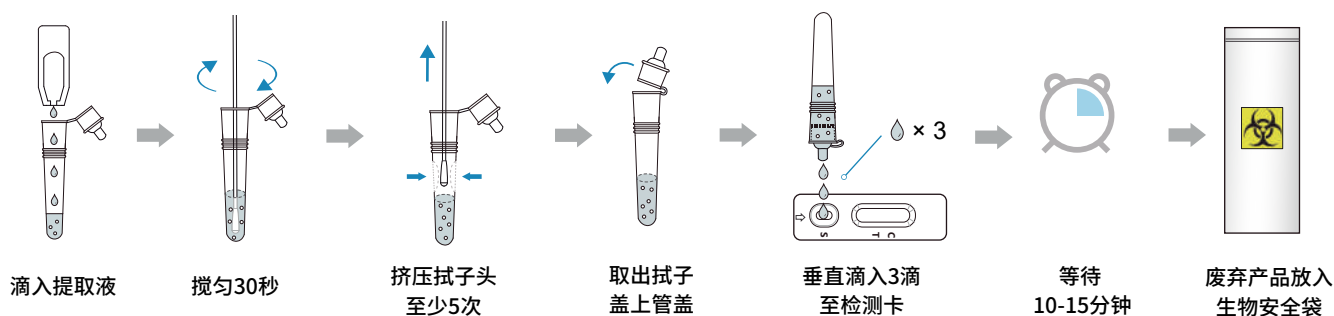

结果判读

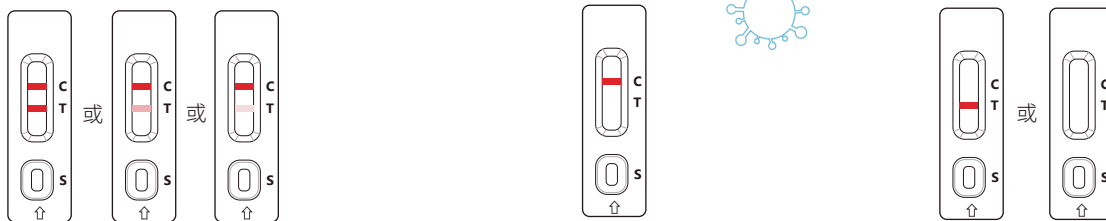

阳性: 两条红色条带出现。一条位于检测区(T)内,另一条位于质控区(C)内。检测区(T)条带颜色可深可浅,均为阳性结果。

阴性: 仅质控区(C)出现一条红色条带,检测区(T)内无条带出现。

无效: 质控区(C)未出现红色条带,无论检测区(T)是否出现条带。表明结果无效,需重新取试纸条重测。

注意事项

1. 检测卡的铝箔袋一旦打开,必须在一小时内尽快使用
2. 单人份样本提取液建议开封后应立即使用
3. 年龄14岁以上的,可自行进行鼻腔拭子采样
年龄2-14岁自检者应由其他成人代为采样

无锡耐思生命科技股份有限公司

◇ 无锡市新吴区梅村工业园锡达路530号

🌐 Website: www.cell-nest.com

☎ +86-510-6800 6788

✉ E-mail: info@nest-wuxi.com

